

## COUSSIN HEMOSTATIQUE 20CM X 10CM X 3CM D'URGENCE - COMPRESSIF

Référence : 3027



### COUSSIN HEMOSTATIQUE D'URGENCE - 20cm x 10cm x 3cm

#### Composition :

- 1 Mousse Polyurethane 24kg/m3
- 1 Pansement « Fluff Américain » 10x10cm intégré au coussin de mousse,
- 1 Bande élastique de maintien 10cm x 2.5m étirés, solidaire du coussin,
- 1 Adhésif de fermeture,
- 1 Compresse de gaze stérile 10x10cm,
- 2 Gants Vinyl,
- 1 Etiquette avec mode d'emploi

### COUSSIN HEMOSTATIQUE D'URGENCE - 20cm x 10cm x 3cm

Le **coussin compressif hémostatique** absorbe le sang et stoppe l'hémorragie. Sous forme de kit destiné à remplacer la compression manuelle effectuée par un sauveteur en cas de forte hémorragie.

- Utilisation sur plaie hémorragique
- Une composition complète pour effectuer une compression rapide
- Sous sachet film transparent
- Durée de vie de 4 ans

#### Utilisation:

- Sur plaie hémorragique, ralentit l'épanchement de sang, par création d'une contre pression à la pression sanguine, en attendant l'arrivée des secours; ce coussin hémostatique est destiné à remplacer un garrot, et à éviter les effets secondaires de ce dernier.

#### Mode d'emploi :

- Ouvrir le sachet contenant le coussin et les gants
- Mettre les gants, dérouler la bande sans l'arracher du coussin de mousse
- Appliquer la compresse stérile sur la plaie

#### Présentation :

Sous sachet film transparent soudé, avec étiquette de mode d'emploi.

#### Durée de vie :

Durée de vie minimum de 4 années à la date de fabrication, indiquée en clair sur la compresse stérile.