

FAUTEUIL ROULANT PLIANT

Référence : 140355



Description

Le **fauteuil roulant pliant** est conçu pour faciliter le transport des personnes à mobilité réduite. Il associe sécurité, simplicité et durabilité, avec une structure en acier, des roues massives et une conception pensée pour les déplacements du quotidien.

Son assise large de 49,5 x 40 cm et son dossier ergonomique améliorent le confort de l'utilisateur. Les accoudoirs rembourrés apportent un appui supplémentaire, tandis que la large poche arrière permet de disposer d'un espace de stockage pratique.

Le fauteuil est facilement pliable pour simplifier le rangement et le transport. Sa largeur totale de 64 cm lui permet de passer par des portes de largeur standard de 72,5 cm, sous réserve de vérifier les dimensions exactes de vos accès.

Les roues arrière peuvent être démontées à l'aide d'une goupille et d'un écrou, ce qui facilite le stockage ou le transport. Avec un poids de 16,5 kg et une capacité maximale de 100 kg, ce fauteuil roulant pliant constitue une solution robuste pour accompagner la mobilité.

Caractéristiques techniques

- Référence 140355
- Dimensions 86 cm x 64 cm x 98,5 cm
- Format Pliant, largeur pliée 26 cm
- Poids 16,5 kg
- Matériaux Cadre en acier, tissu ignifugé
- Capacité Poids maximal supporté : 100 kg

Propriétés du fauteuil roulant pliant

Ce fauteuil roulant pliant associe une **assise large**, un dossier ergonomique, des accoudoirs rembourrés, des repose-pieds rabattables, des roues massives et une large poche arrière. Sa structure en acier, son tissu ignifugé et ses roues arrière démontables en font une solution pratique pour le transport et le stockage.

Fauteuil roulant pliant bleu : transport pratique et assise confortable

Fauteuil roulant pliant bleu conçu pour transporter les personnes à mobilité réduite avec sécurité, simplicité et confort,

FAUTEUIL ROULANT PLIANT

Référence : 140355

grâce à une assise large, un dossier ergonomique, des roues massives et une structure en acier.

- Fauteuil facilement pliable
- Assise large confortable
- Dossier ergonomique
- Roues massives
- Poche arrière pratique

Mode d'emploi

- Plier le fauteuil roulant pour faciliter son rangement ou son transport.
- Serrer et attacher les repose-pieds avec la vis située à la fin du tube, à l'aide de la clé incluse.
- Démontez les roues arrière à l'aide d'une goupille et d'un écrou si le transport ou le stockage le nécessite.
- Utiliser la poche arrière pour disposer d'un espace de stockage supplémentaire.

Précautions d'utilisation

- Vérifier que la largeur des portes est adaptée à la largeur totale du fauteuil de 64 cm.
- Contrôler les dimensions du coffre du véhicule avant de transporter le fauteuil plié.
- Respecter le poids maximal supporté de 100 kg.
- S'assurer que les repose-pieds sont correctement serrés et attachés avant utilisation.

Un fauteuil roulant pliant pour faciliter le transport et la mobilité

Le **fauteuil roulant pliant** répond aux besoins des structures qui recherchent une solution simple, robuste et transportable pour accompagner les personnes à mobilité réduite. Son assise large, son dossier ergonomique, ses accoudoirs rembourrés, ses roues massives et son cadre en acier en font un équipement adapté aux déplacements, au rangement et à l'usage ponctuel ou régulier. Pour comparer ce modèle avec d'autres solutions de mobilité, retrouvez nos [fauteuils roulants et équipements associés](#).

Sa conception pliable facilite le transport, tandis que ses roues arrière démontables permettent de gagner en praticité lors du stockage. Ce fauteuil roulant s'intègre naturellement dans l'[équipement complet d'une infirmerie ou d'un espace de soin](#), notamment pour organiser l'accueil et le déplacement des personnes ayant besoin d'une aide à la mobilité.

Ce fauteuil roulant est-il pliant ?

+
Oui, ce fauteuil roulant est pliant. Sa largeur pliée est de 26 cm, ce qui facilite le rangement et le transport.

Quel poids maximal ce fauteuil roulant peut-il supporter ?

+



FAUTEUIL ROULANT PLIANT

Référence : 140355

Ce fauteuil roulant peut supporter un poids maximal de 100 kg. Il pèse 16,5 kg.

Quelles sont les dimensions du fauteuil roulant pliant ?

+

Le fauteuil mesure 86 cm de hauteur, 64 cm de largeur totale et 98,5 cm de longueur. Son assise mesure 49,5 x 40 cm.

Les roues arrière sont-elles démontables ?

+

Oui, les roues arrière peuvent être démontées à l'aide d'une goupille et d'un écrou. Cette possibilité facilite le transport ou le stockage du fauteuil.

Ce fauteuil roulant peut-il passer par une porte standard ?

+

Avec sa largeur totale de 64 cm, ce fauteuil peut passer par des portes d'une largeur standard de 72,5 cm. Il reste toutefois nécessaire de vérifier les dimensions exactes de vos portes avant utilisation.