

## TEST URINAIRE DE DÉPISTAGE DE CANNABIS

Référence : 160036

### TEST URINAIRE DE DEPISTAGE DE CANNABIS

#### Caractéristiques :



- Ce **test de dépistage du THC** (la substance active du cannabis) se présente sous la forme d'une simple bandelette urinaire.
- **Quelques gouttes d'urine** suffisent. Trempez la bandelette, et vous aurez une **réponse claire en 5 minutes**.
- Les **tests urinaires** sont **réputés pour leur fiabilité**, et sont utilisés par la plupart des laboratoires d'analyse, hôpitaux et centres de désintoxication.

#### Que dit exactement ce test ?

- Ce test permet de savoir si, **oui** ou **non**, les urines testées contiennent des traces de cannabis.
- Le résultat sera donc **négatif** ou **positif**.
  - **Négatif** : pas de THC (cannabis) dans les urines.
  - **Positif** : THC présent dans les urines.

#### Que dépiste ce test ?

Le cannabis et ses dérivés, à savoir : Herbe / Marijuana (naturelle ou cultivée sous serre), Haschich (plus communément appelé "chite"), Huile de cannabis

**Quelque soit le mode de consommation** : En cigarette (joint), en pipe (aussi appelée "bang") ou en inhalateur/vaporisateur, en ingestion, sous forme de gâteau ou autres mélanges avec des aliments.

### TEST URINAIRE DE DEPISTAGE DE CANNABIS

**Test urinaire de dépistage du THC** (la substance active du cannabis) se présente sous la forme d'une simple bandelette urinaire.

- **Quelques gouttes** suffisent
- Réputé pour sa **fiabilité**
- Réponse en **5 minutes**

#### Informations complémentaires :

#### Quand utiliser ce test ?



## TEST URINAIRE DE DÉPISTAGE DE CANNABIS

Référence : 160036

- Pour rechercher spécifiquement des traces de cannabis. Ces bandelettes urinaires de dépistage monodrogue sont alors le choix le plus adapté et le plus économique.
- Pour apporter une première vérification au résultat positif au cannabis d'un test urinaire multiple (ou multitest).
- Idem pour un test salivaire positif au THC.

**Mode d'emploi :**

