

50 PANSEMENTS DÉTECTABLES PLASTIQUE MICROPERFORÉ 72X38MM

Référence : 1068

Description :



- Protège rapidement les **petites plaies** avec un **pansement occlusif** au format 72x38 mm.
- Support **plastique microperforé** pour un port plus confortable au quotidien.
- Couleur **bleue** pensée pour être **facilement repérable** en cas de chute/perte.
- **Résistant à l'eau** pour rester en place lors des gestes fréquents (lavage, humidité).
- Adhésif **acrylique sans latex** avec **compresse non-adhérente** pour limiter l'accrochage à la plaie.

Caractéristiques techniques :

- **Type** : Pansement occlusif
- **Dimensions** : 72 x 38 mm
- **Support** : Plastique microperforé
- **Détection** : Repérable par la couleur bleue et détectable par détecteur de métaux
- **Adhésif** : Acrylique sans latex + compresse non-adhérente

Déstockage

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation le **01 septembre 2026**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !

Pansements détectables plastique microperforé 72x38 mm : Sécuriser les petits bobos en milieu exigeant

Idéals pour une **protection hygiénique** et une meilleure **détection** en cas de perte, notamment dans les environnements où la vigilance est essentielle.

- **Détectables dans la chaîne de production**
- **Couleur bleue bien repérable**
- **Support plastique microperforé**
- **Résistants à l'eau**
- **Adhésif acrylique sans latex**



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

50 PANSEMENTS DÉTECTABLES PLASTIQUE MICROPERFORÉ 72X38MM

Référence : 1068

Mode d'emploi :

- Nettoyer puis sécher soigneusement la zone à protéger.
- Sortir un **pansement détectable** et éviter de toucher la partie centrale.
- Appliquer la **compresse non-adhérente** sur la plaie, puis lisser les bords pour une bonne adhérence.
- Renouveler le pansement dès qu'il se décolle, est souillé ou après un lavage prolongé.
- Éliminer le pansement usagé selon vos procédures internes d'hygiène.

Précautions d'utilisation :

- Ne pas utiliser si l'emballage ou le pansement est endommagé.
- En cas de plaie profonde, saignement important ou signes d'infection, demander un avis médical.
- Arrêter l'utilisation en cas d'irritation, rougeur ou inconfort persistant.
- Produit destiné aux **petits soins** : ne remplace pas un pansement compressif ou un soin spécialisé si nécessaire.
- Conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur pour préserver l'adhésif.

Le pansement bleu détectable pensé pour la restauration et l'agroalimentaire

En restauration, ateliers et environnements de préparation, un simple pansement peut devenir un **risque de contamination** s'il est perdu. Ces **pansements bleus détectables** combinent une **couleur visible** et une **détectabilité** (détecteur de métaux) pour renforcer la maîtrise des incidents, tout en assurant une **protection hygiénique** au format 72x38 mm. Pour compléter votre équipement, découvrez aussi nos [Pansements bleus détectables](#) ainsi que l'ensemble de nos [Pansements](#).

Le support **plastique microperforé** et l'adhésif **acrylique sans latex** facilitent l'usage au quotidien, même lorsque les mains sont souvent sollicitées. **Ajoutez votre lot de 50 au panier** pour sécuriser vos petits soins et garder une réserve prête à l'emploi.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502