

## 30 DOSETTES SÉRUM PHYSIOLOGIQUE 5 ML AVEC EMBOUT

Référence : 90026

### Description

- Sérum physiologique stérile prêt à l'emploi pour l'hygiène quotidienne du nez et des yeux.
- Format unidose de 5 ml avec embout pour une instillation simple et plus précise.
- Convient aux nourrissons, enfants et adultes selon les usages indiqués sur la fiche produit.
- Peut être utilisé pour le lavage des fosses nasales, le rinçage oculaire, la toilette locale et le rinçage de petites plaies superficielles.
- Conditionnement en boîte de 30 dosettes, pratique pour les soins du quotidien comme pour une trousse de premiers secours.



### Caractéristiques techniques

- **Type de produit** : sérum physiologique en dosettes stériles
- **Contenance** : 30 unidoses de 5 ml
- **Composition** : solution isotonique de chlorure de sodium 0,9 g dans de l'eau purifiée q.s.p. 100 ml, sans conservateur
- **Présentation** : boîte avec embout sécable pour une instillation facilitée
- **Référence** : 90026

### Composition

Chaque dosette contient une **solution isotonique de chlorure de sodium 0,9 %** formulée dans de l'eau purifiée, sans conservateur. Cette composition est adaptée à l'hygiène nasale et oculaire ainsi qu'à la toilette locale. Le format stérile unidose contribue à une utilisation hygiénique, aussi bien à domicile qu'en milieu professionnel.

## Sérum physiologique 5 ml : l'unidose stérile pratique au quotidien

**Sérum physiologique 5 ml** en boîte de 30 unidoses avec embout, cette solution stérile prête à l'emploi facilite l'hygiène du nez, des yeux et de la peau pour toute la famille.

- **Unidoses stériles pratiques**
- **Embout sécable précis**



## 30 DOSETTES SÉRUM PHYSIOLOGIQUE 5 ML AVEC EMBOUT

Référence : 90026

- **Sans conservateur**
- **Usage multi-zones**
- **Adapté à tous**

### Mode d'emploi

- Se laver soigneusement les mains avant toute utilisation.
- Détacher une dosette de 5 ml puis ouvrir l'embout sécable en le tournant.
- Vérifier que la solution est parfaitement limpide avant usage.
- Pour le lavage nasal, incliner légèrement la tête, placer délicatement l'embout à l'entrée de la narine puis presser la dosette.
- Pour le rinçage oculaire, appliquer en bain oculaire ou imbiber une compresse stérile puis nettoyer doucement le contour de l'œil.

### Précautions d'utilisation

- Ne pas utiliser une dosette endommagée, ouverte ou contenant une solution non limpide.
- Produit à usage unique : ne pas conserver une dosette entamée, ne pas la réutiliser et ne pas tenter de la restériliser.
- Ne pas injecter le sérum physiologique ; il est réservé au lavage externe du nez, des yeux ou de la peau.
- Tenir hors de portée des enfants et ne pas laisser les dosettes sans surveillance.
- Respecter les recommandations médicales en cas d'irritation persistante ou d'infection et ne pas utiliser après la date de péremption.

## Une solution stérile pratique pour l'hygiène nasale et oculaire

Le sérum physiologique en dosettes répond aux besoins des particuliers comme des professionnels recherchant une solution simple, hygiénique et prête à l'emploi pour le nettoyage du nez, le rinçage des yeux ou la toilette locale. Ce format de 30 unidoses de 5 ml avec embout convient particulièrement aux usages réguliers et trouve naturellement sa place parmi les solutions de [sérum physiologique en dosettes](#).

### À quoi sert le sérum physiologique en dosettes de 5 ml ?

+

Le sérum physiologique en dosettes est utilisé pour l'hygiène du nez, le rinçage oculaire et la toilette locale. Il peut aussi servir au rinçage de petites plaies superficielles.

### Ce sérum physiologique convient-il aux bébés et aux enfants ?

+



## 30 DOSETTES SÉRUM PHYSIOLOGIQUE 5 ML AVEC EMBOUT

Référence : 90026

Oui il convient aux nourrissons, enfants et adultes. Son format unidose stérile facilite une utilisation hygiénique au quotidien.

### **Pourquoi choisir des unidoses stériles avec embout ?**

+

Le format unidose permet d'utiliser une quantité prête à l'emploi sans conservateur. L'embout sécable aide à réaliser une instillation plus simple pour le nez ou les yeux.

### **Peut-on réutiliser une dosette de sérum physiologique entamée ?**

+

Non, ce produit est à usage unique. Une dosette entamée ne doit pas être conservée, réutilisée ni restérilisée.