

## PACK CHAUD INSTANTANÉ

Référence : 14026

### Description :



- Pack chaud instantané en textile non tissé imprimé, conçu pour délivrer une chaleur localisée et apaisante.
- Activation simple : il suffit de presser la boule contenue dans la poche pour déclencher l'élévation de température.
- Diffusion de chaleur jusqu'à environ +50 °C, idéale pour soulager les douleurs musculaires et les crampes menstruelles.
- La chaleur favorise la circulation sanguine et la dilatation des vaisseaux, contribuant à détendre les zones contractées.
- Format compact, facile à glisser dans une trousse de secours, un sac de sport ou un bagage pour bénéficier d'un effet chaud partout.

### Caractéristiques techniques :

- **Support** : textile non tissé imprimé, agréable au contact.
- **Dimensions** : 14 × 18 cm, couverture confortable de la zone douloureuse.
- **Température** : montée rapide de la chaleur jusqu'à environ +50 °C après activation.
- **Utilisation** : pack chaud instantané par percussion, à usage unique, pour douleurs musculaires et menstruelles.
- **Classe** : classe IIa, conditionné à l'unité pour une mise en œuvre rapide.

## Pack chaud instantané : chaleur immédiate pour soulager les douleurs

Poche chauffante à usage unique en textile non tissé, qui délivre une chaleur rapide jusqu'à +50 °C par simple pression, idéale pour apaiser les douleurs musculaires et menstruelles, à la maison comme en déplacement.

- **Activation par simple pression**
- **Chaleur rapide jusqu'à +50 °C**
- **Format pratique 14 × 18 cm**
- **Textile non tissé confortable**
- **Parfait pour les déplacements**

### Mode d'emploi :

- Localiser la petite bille à l'intérieur du pack chaud instantané et la presser fermement pour déclencher la réaction.
- Attendre quelques instants : une diffusion immédiate de chaleur se produit dans toute la poche.
- Placer le pack chaud sur la zone douloureuse (dos, nuque, ventre, muscles...) en interposant de préférence une housse de protection ou un tissu fin.
- Laisser agir la chaleur le temps nécessaire pour ressentir un effet de détente et de soulagement.



## PACK CHAUD INSTANTANÉ

Référence : 14026

- Après utilisation, laisser refroidir puis jeter le pack chaud instantané dans une poubelle adaptée, le produit étant à usage unique.

### Précautions d'utilisation :

- Vérifier la température du pack avant application, surtout chez l'enfant, la personne âgée ou à peau fragile, afin de limiter le risque de brûlure.
- Ne pas appliquer directement sur une peau lésée, irritée ou présentant une plaie ouverte.
- Éviter une utilisation prolongée sur la même zone sans contrôle régulier de la peau.
- Ne pas réutiliser ni tenter de réactiver un pack déjà utilisé : produit strictement à usage unique.
- Conserver les packs non activés dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur excessive, et hors de portée des jeunes enfants.

## Une poche chaude instantanée pour la thermothérapie nomade

Le **pack chaud instantané** est une solution simple et efficace pour pratiquer la **thermothérapie** partout où vous en avez besoin. En quelques secondes, la poche diffuse une **chaleur apaisante** qui active la circulation sanguine et favorise la détente des muscles, idéale pour soulager les **douleurs musculaires**, les tensions cervicales ou les **douleurs menstruelles**. Son format en **textile non tissé** le rend confortable à l'usage et facile à positionner sur les zones sensibles.

Compact et à **usage unique**, ce **pack chauffant** trouve naturellement sa place dans une **trousse de secours**, un sac de sport, une valise ou un kit d'**urgence**. Parfait pour les déplacements professionnels, voyages, activités sportives ou sorties scolaires, il permet de disposer à tout moment d'une **poche chaude instantanée** sans source d'énergie ni matériel complémentaire.