

FAUTEUIL DE RELAXATION PLIANT

Référence : 14030



Description :

- Fauteuil de relaxation manuel, idéal pour favoriser la circulation sanguine grâce à sa position relax et à son repose-pieds cintré légèrement courbé.
- Multi-positions : inclinaison du dossier, basculement naturel et accoudoirs fixes pour faciliter l'entrée et la sortie du fauteuil.
- Transformable rapidement en lit d'appoint pour offrir un couchage d'appoint confortable aux accompagnants ou au personnel.
- Matelas en mousse haute densité de 6 cm assurant une assise souple et un soutien homogène du corps.
- Repose-tête ergonomique, réglable et amovible, pour un maintien adapté de la nuque et de la tête en position allongée ou semi-allongée.

Caractéristiques techniques :

- **Épaisseur du matelas** : mousse haute densité 6 cm.
- **Position relax** : inclinaison à 127° pour une détente optimale.
- **Dimensions et poids** : largeur 70 cm, hauteur d'assise 44 cm, poids fauteuil 13,9 kg.
- **Capacité utilisateur** : poids maximal recommandé 140 kg.
- **Coloris et revêtement** : couleur eucalyptus, revêtement en cuir synthétique lavable, facile d'entretien.

Fauteuil de relaxation pliant : confort multi-positions et gain de place

Offrez un véritable espace de repos avec un fauteuil manuel multi-positions, transformable en lit d'appoint, doté d'un matelas mousse haute densité et d'une structure légère facilement pliable pour le stockage et le transport.

- **Transformable en lit d'appoint**
- **Multi-positions relax 127°**
- **Matelas mousse 6 cm**
- **Structure légère pliable**
- **Revêtement lavable**

Mode d'emploi :

- Déplier le fauteuil de relaxation pliant et vérifier que la structure est complètement ouverte et stable avant installation de l'utilisateur.
- Ajuster l'inclinaison du dossier et le basculement du fauteuil en sélectionnant la position relax souhaitée, jusqu'à 127°.
- Régler la tête-épaulière ergonomique à la hauteur souhaitée pour soutenir confortablement la tête et la nuque.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

FAUTEUIL DE RELAXATION PLIANT

Référence : 14030

- Utiliser les accoudoirs fixes pour faciliter l'installation et la sortie de la personne, en accompagnant les mouvements de bascule naturelle.
- Pour transformer le fauteuil en lit d'appoint, allonger complètement le dossier et le repose-pieds afin d'obtenir une surface quasi plane, puis replacer la personne en position couchée.

Précautions d'utilisation :

- Vérifier régulièrement la stabilité de la structure, le bon verrouillage des positions et l'absence de jeu anormal avant chaque utilisation.
- Ne pas dépasser le poids maximal utilisateur de 140 kg afin de préserver la sécurité et la durée de vie du fauteuil.
- Éviter d'installer le fauteuil sur un sol irrégulier ou glissant ; privilégier une surface plane et dégagée.
- Nettoyer le revêtement en cuir synthétique avec un chiffon doux légèrement humide et un détergent non agressif ; ne pas utiliser de solvants ni d'abrasifs.
- Plier et déplacer le fauteuil en respectant la notice afin de ne pas forcer sur les articulations et de limiter les risques de chute ou de pincement.

Un fauteuil de relaxation pliant idéal en établissement et à domicile

Le **fauteuil de relaxation pliant** est particulièrement adapté aux **établissements de soins, infirmeries, maisons de repos, collectivités** ou encore aux **espaces de repos en entreprise**. Sa conception multi-positions, son matelas mousse haute densité de 6 cm et son repose-pieds cintré offrent une réelle **position de relaxation** pour soulager les tensions et favoriser la circulation sanguine. Une fois allongé, il se transforme en **lit d'appoint confortable** pour les accompagnants ou les temps de repos prolongés.

Grâce à sa **structure légère et pliable**, ce fauteuil relax se déplace et se stocke facilement, tout en conservant un excellent niveau de confort grâce à ses accoudoirs matelassés et à sa tête-épaulière ergonomique. Son revêtement en **cuir synthétique lavable** facilite l'hygiène au quotidien, ce qui en fait une solution idéale pour les environnements professionnels comme pour une utilisation à domicile. Intégrer ce fauteuil à votre espace de repos, c'est améliorer le confort des usagers tout en optimisant l'encombrement et la modularité des lieux.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502