

LECTEUR DE GLYCÉMIE ACCU-CHEK GUIDE

Référence : 14032-21

LECTEUR GLYCEMIE ACCU CHECK GUIDE

Caractéristiques Techniques:

Dimensions: L 80 x l 47 x H 20mm

Poids 40gr (avec les piles) **Alimenté par 2 piles bouton CR2032**

Mémoire: 720 résultats glycémiques

Principe de mesure: Electrochimique

Taille de l'échantillon: 0.6ul

Echelle de mesure: 10-600mg/dl

Paramétrage: "Paramétrage d'un objectif unique ou de 2 objectifs glycémiques avant repas et après repas. Rappels des mesures (4 par jour)



LECTEUR GLYCEMIE ACCU CHECK GUIDE

Ce lecteur permet de contrôler sa glycémie de manière simple et discrète.

Son flacon anti-renversement, l'éclairage de la zone d'insertion de la bandelette et le bouton d'ejection vous facilite son utilisation.

Très rapide grâce à son résultat en moins de 4 secondes.

Large écran pour une bonne visibilité

Technologie sans fil par Bluetooth

LECTEUR GLYCEMIE ACCU CHECK GUIDE

Mode d'emploi:

1. Poussez une bandelette vers le haut en exerçant une légère pression avec le pouce et retirez-la de la boîte. Puis refermez soigneusement le couvercle.
2. Insérez la bandelette dans le lecteur en respectant le sens indiqué par la flèche. Le lecteur s'allume alors automatiquement.
3. Utilisez toujours une petite goutte de sang frais bien formée. Ne laissez pas la goutte s'étaler sur le doigt.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

LECTEUR DE GLYCÉMIE ACCU-CHEK GUIDE

Référence : 14032-21

4. Mettez celle-ci en contact avec l'extrémité jaune de la bandelette. Enlevez votre doigt de la zone dès que le message Mesure en cours s'affiche à l'écran.
5. Le résultat s'affiche à l'écran au bout de 4 secondes.
6. Appuyez sur cette touche pour éjecter la bandelette du lecteur. Appuyez sur la touche OK pendant 3 secondes ou attendez 15 secondes pour que le lecteur s'éteigne.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502