

## 200 LANCETTES STÉRILES

Référence : 14033

Revêtement en silicone pour plus de douceur lors de l'intégration de la lancette.



### FICHE TECHNIQUE

Diamètre d'aiguille : 0,4 mm et 0,8 mm Revêtement siliconé

Boite de 200 lancettes

#### **MODE D'EMPLOI :**

1. Insertion de la lancette  
Tirer sur l'embout du stylo pour l'enlever.  
Insérer la lancette stérile dans le porte-lancette.  
Retirer le capuchon protecteur de la lancette en le faisant pivoter.  
Remettre l'embout du stylo en le poussant au maximum jusqu'au déclic.  
L'encoche sur l'anneau blanc sert de guide pour repositionner l'embout.

#### **2 Choix de la profondeur de piqûre**

Tourner l'extrémité de l'embout pour faire apparaître la position sélectionnée  
11 positions sont possibles (de 0,5 à 5,5), les positions intermédiaires étant représentées par des points.

**Première utilisation :** toujours commencer par la première position.

Si la goutte de sang ainsi obtenue est insuffisante, choisir une position de réglage supérieure que vous conserverez pour les prélèvements suivants.

3. Prélèvement de la goutte de sang  
Armer le stylo en poussant jusqu'au déclic le bouton d'armement.  
La fenêtre transparente se colore en jaune.  
Appliquer le stylo sur le côté du doigt et appuyer sur le bouton jaune de déclenchement.



## 200 LANCETTES STÉRILES

Référence : 14033

Attendre quelques secondes que la goutte de sang se forme.

#### 4 Ejection de la lancette

Enlever l'embout du stylo et faire coulisser l'anneau pour éjecter automatiquement la lancette en ayant soin de tenir le stylo en position verticale.

Pour éviter les risques d'infection, utiliser une nouvelle lancette à chaque prélèvement de sang.