

LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale, des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30 04 93 19 20 23

200 LANCETTES STÉRILES Référence: 14033

Revêtement en silicone pour plus de douceur lors de l'intégration de la lancette.



FICHE TECHNIQUE

Diamètre d'aiguille : 0,4 mm et 0,8 mm Revêtement siliconé

Boite de 200 lancettes

MODE D'EMPLOI:

1. Insertion de la lancette

Tirer sur l'embout du stylo pour l'enlever.

Insérer la lancette stérile dans le porte-lancette.

Retirer le capuchon protecteur de la lancette en le faisant pivoter.

Remettre l'embout du stylo en le poussant au maximum jusqu'au déclic.

L'encoche sur l'anneau blanc sert de guide pour repositionner l'embout.

2 Choix de la profondeur de piqûre

Tourner l'extrémité de l'embout pour faire apparaître la position sélectionnée

11 positions sont possibles (de 0,5 à 5,5), les positions intermédiaires étant représentées par des points.

Première utilisation: toujours commencer par la première position.

Si la goutte de sang ainsi obtenue est insuffisante, choisir une position de réglage supérieure que vous conserverez pour les prélèvements suivants.

3. Prélèvement de la goutte de sang

Armer le stylo en poussant jusqu'au déclic le bouton d'armement.

La fenêtre transparente se colore en jaune.

Appliquer le stylo sur le côté du doigt et appuyer sur le bouton jaune de déclenchement.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale, des collectivités et des entreprises L. au V. de 8h30 à 17h30 04 93 19 20 23

200 LANCETTES STÉRILES Référence : 14033

Attendre quelques secondes que la goutte de sang se forme.

4 Ejection de la lancette

Enlever l'embout du stylo et faire coulisser l'anneau pour éjecter automatiquement la lancette en ayant soin de tenir le stylo en position verticale.

Pour éviter les risques d'infection, utiliser une nouvelle lancette à chaque prélèvement de sang.