

GARROT TOURNIQUET SOF

Référence : 14070-SOF



GARROT TOURNIQUET SOF

Caractéristiques :

- Matière: Nylon et Aluminium
- Le garrot tourniquet est un moyen sûr et efficace pour contrôler les hémorragies sévères.
- En cas de doute ou si vous n'avez pas le temps de vérifier d'où le saignement provient ; le garrot tourniquet peut être appliqué sur les vêtements.
- Le garrot ne doit pas être appliqué sur des objets solides se trouvant dans les vêtements.

Mode d'emploi d'un garrot tourniquet ou d'un garrot d'urgence :

Si les circonstances sont jugées nécessaires par les secouristes, le mode d'emploi du garrot tourniquet suit les instructions de pose suivantes :

1. Poser le garrot à proximité du saignement, et passer la boucle de la bande autour du membre lésé.
2. Tirer, serrer et fixer la bande (ajuster la bande).
3. Tourner la baguette jusqu'à l'arrêt total du saignement
4. Fixez la tige et la bande avec la sangle et faites-la adhérer au crochet opposé du clip du coupe-vent.
5. Enregistrer l'heure de l'application.

Quand et comment utiliser un garrot tourniquet

Le sang étant essentiel pour assurer le transport de l'oxygène vers les différents organes de notre corps, la gravité de la situation en cas d'hémorragie externe augmente d'autant plus si la quantité de sang perdu est importante. C'est pourquoi il est crucial d'agir le plus rapidement possible pour arrêter l'hémorragie au plus tôt.

La pose d'un garrot tourniquet fait partie des gestes d'urgence permettant d'arrêter un saignement important dans des conditions exceptionnelles. En effet, ce geste s'effectue uniquement dans les situations suivantes :

- Soit la compression directe avec la main ou un pansement compressif au niveau du membre atteint :
 - 1 - N'est pas réalisable : impossible d'accéder à la plaie par exemple
 - 2 - N'est pas efficace : aucune des compressions (ni à la main, ni avec le pansement compressif) n'a permis de stopper l'hémorragie
- Soit les circonstances sont exceptionnelles : forte affluence de victimes par exemple.

GARROT TOURNIQUET SOF

Référence : 14070-SOF

En résumé, il est recommandé de positionner un garrot tourniquet uniquement si la victime présente un cas d'hémorragie externe grave qui ne peut pas être contrôlée par une compression locale directe.

GARROT TOURNIQUET SOF

- **Garrot** qui peut être posé d'une seule main.
- Il est nécessaire pour **stopper une hémorragie** importante sur un membre
- **Deux anneaux de blocages pour une sécurité supplémentaire pour la fermeture**
- **Pose intuitive et rapide**

Pourquoi seul un intervenant du corps médical est autorisé à enlever un garrot tourniquet ?

Lorsque l'on relâche la tension du garrot, les toxines accumulées dans le membre atteint sont libérées dans le corps ce qui pourrait provoquer un aggravement de l'état de la victime.

Il est donc indispensable que :

- L'horaire de pose du garrot soit bien indiqué,
- Le desserrage soit supervisé par le corps médical.

NB : tous ces éléments techniques sont donnés à titre indicatif. Il est impératif de suivre les formations de secourisme pour prétendre pouvoir utiliser ce matériel.

Pourquoi choisir le garrot tourniquet ?

Le modèle sélectionné par TAMÔ présente plusieurs avantages par rapport aux autres produits présents sur le marché :

- La compression est sûre grâce à sa vis de réglage de sécurité spécifique, ce qui empêche le desserrage accidentel,
- La mise en place est facile et même possible avec des gants,
- Le desserrage est rapide et les risques liés sont minimisés grâce à sa conception sans aucun velcro
- La bouclerie en métal en fait un garrot tourniquet très robuste,
- La boucle fonctionne parfaitement même en cas de salissure.