

## 50 PANSEMENTS DÉTECTABLES TISSÉS COTON BLEU 7,5 X 5 CM

Référence : 1104

### Description :



- Format **papillon** qui aide à bien épouser le **bout de doigt** et à rester en place.
- Support en **tissé coton** pour un port plus agréable sur les zones mobiles.
- Conçu pour être **repérable** grâce à la **couleur bleue**, pratique en cas de chute.
- **DéTECTABLE** dans la chaîne de production, pour renforcer la maîtrise des incidents.
- **Compresse non-adhérente** pour limiter l'accrochage à la plaie lors du retrait.

### Caractéristiques techniques :

- **Type** : Pansement occlusif
- **Dimensions** : 7,5 x 5 cm
- **Support** : Tissé coton bleu
- **Détection** : Couleur bleue + détectable au **détecteur de métaux** (fil d'aluminium sous la compresse)
- **Adhésif** : Colle forte + compresse non-adhérente

### Déstockage

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation le **01 septembre 2026**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !

## Pansements détectables tissés coton bleu 7,5 x 5 cm : Protéger le bout du doigt en environnement sensible

Une solution fiable pour assurer une **protection hygiénique** des petites plaies tout en facilitant la **détection** en cas de perte, grâce à une conception pensée pour les zones de préparation.

- **Détectables dans la chaîne de production**
- **Couleur bleue bien repérable**
- **Support tissé coton confortable**
- **Colle forte pour bonne tenue**
- **Compresse non-adhérente**



## 50 PANSEMENTS DÉTECTABLES TISSÉS COTON BLEU 7,5 X 5 CM

Référence : 1104

### Mode d'emploi :

- Nettoyer puis sécher la zone à protéger.
- Sortir un **pansement détectable** et positionner la partie centrale sur la plaie.
- Envelopper le **bout de doigt** avec la forme **papillon** pour une tenue régulière.
- Appuyer sur les bords afin d'activer la **colle forte** et optimiser l'adhérence.
- Remplacer dès qu'il est souillé, humide ou moins adhérent pour conserver une protection propre.

### Précautions d'utilisation :

- Appliquer sur peau propre et sèche pour limiter le décollement.
- Éviter de trop serrer autour du doigt afin de ne pas gêner le confort.
- Ne pas utiliser si le pansement est abîmé ou ne tient pas correctement.
- En cas d'irritation, arrêter l'utilisation et changer de solution de protection.
- Pour les plaies importantes ou persistantes, adapter la protection selon vos procédures internes.

## Le pansement bleu détectable en coton pensé pour l'alimentaire

Quand l'hygiène et la traçabilité sont essentielles, le **pansement bleu détectable** devient un vrai allié : il est **repérable** visuellement et **détectable au détecteur de métaux** grâce à un **fil d'aluminium** placé sous la compresse. Sa forme **papillon** aide à protéger efficacement le **bout de doigt** tout en maintenant une **protection hygiénique**, avec une **compresse non-adhérente** et une **colle forte** pour la tenue. Découvrez aussi nos [pansements bleus détectables](#) et l'ensemble des [pansements](#).

Conditionné par **50**, ce format facilite la gestion des consommations et la disponibilité au poste.