


## AUTOPIQUEUR ET 25 LANCETTES STÉRILES

Référence : 14039

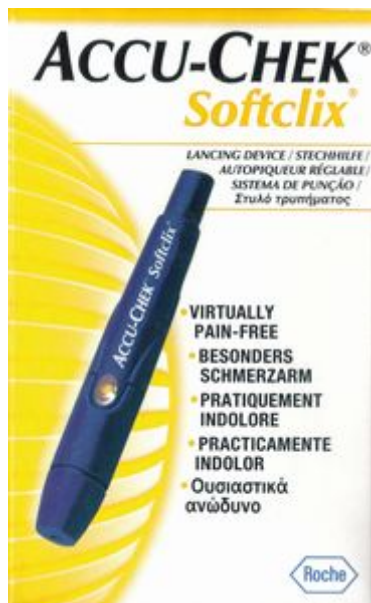

11 profondeurs de piqûres.

### Déstockage

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation le **31/10/2025**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !

### FICHE TECHNIQUE

#### **Robustesse**

- reproductibilité de la piqûre
- trajectoire rectiligne
- vitesse de pénétration optimale (10 millisecondes)
- plus grande longévité

#### **Aucun ressort pour la propulsion de la lancette**

- pas d'effet rebond
- pas de vibration
- pas de déchirure des tissus



## AUTOPIQUEUR ET 25 LANCETTES STÉRILES

Référence : 14039

**11 profondeurs de piqûre** (de 0.5 à 5.5) : une véritable adaptation à chaque type de peau

**Livré avec 25 lancettes stériles**

### MODE D'EMPLOI :

#### **1. Insertion de la lancette**

Tirer sur l'embout du stylo pour l'enlever.

Insérer la lancette stérile dans le porte-lancette.

Retirer le capuchon protecteur de la lancette en le faisant pivoter.

Remettre l'embout du stylo en le poussant au maximum jusqu'au déclic.

L'encoche sur l'anneau blanc sert de guide pour repositionner l'embout.

#### **2 Choix de la profondeur de piqûre**

Tourner l'extrémité de l'embout pour faire apparaître la position sélectionnée

11 positions sont possibles (de 0,5 à 5,5), les positions intermédiaires étant représentées par des points.

**Première utilisation** : toujours commencer par la première position.

Si la goutte de sang ainsi obtenue est insuffisante, choisir une position de réglage supérieure que vous conserverez pour les prélèvements suivants.

#### **3. Prélèvement de la goutte de sang**

Armer le stylo en poussant jusqu'au déclic le bouton d'armement.

La fenêtre transparente se colore en jaune.

Appliquer le stylo sur le côté du doigt et appuyer sur le bouton jaune de déclenchement.

Attendre quelques secondes que la goutte de sang se forme.

#### **4 Ejection de la lancette**

Enlever l'embout du stylo et faire coulisser l'anneau pour éjecter automatiquement la lancette en ayant soin de tenir le stylo en position verticale.

Pour éviter les risques d'infection, utiliser une nouvelle lancette à chaque prélèvement de sang.