

## SUPERSANIBOX 0,50 LITRE (SERINGUES + AIGUILLES)

### SUPERSANIBOX

Référence : 160150



Capacité de 350 aiguilles

Permet de conditionner et d'éliminer les aiguilles usagées.

Indicateur du niveau maximum de remplissage

Fermeture définitive inviolable

Guide d'introduction et de dévissage des aiguilles

Dispositif interne de sécurité

#### MODE D'EMPLOI :

Enfoncer le bouton poussoir rouge pour ouvrir la boîte, introduire l'aiguille à l'intérieur. Relâcher le bouton poussoir et pivoter la seringue. L'aiguille est détachée. Pour une fermeture définitive, enfoncer le bouton rond rouge.

#### PRECAUTION D'EMPLOI :

Ne jamais forcer l'introduction des déchets

Indicateur du niveau maximum de remplissage

Fermeture définitive inviolable

Guide d'introduction et de dévissage des aiguilles

Dispositif interne de sécurité

Contenance : 0,50 L (Seringues + aiguilles)

Conforme à la norme AFNOR NFX-30500