

100 LINGETTES NETTOYANTES - DÉSINFECTANTES GRAND MODÈLE POUR LES SURFACES ET MATÉRIELS

Référence : 14099

100 LINGETTES NETTOYANTES - DÉSINFECTANTES GRAND MODELE

Conditionnement:



- **Format de lingette : 180 x 200mm.**
- **Actifs**
- **Ethanol (< 3%)**
- **Dimethylbenzylammonium chloride**
- **Propan-2-ol (< 1%).**

Propriétés microbiologiques:

- **Bactéricide EN1276*, EN13727, EN13697*, EN14561 (dont SARM) en 5 min.**
- **Tuberculocide sur Mycobacterium Terrae EN14348* et EN14563* en 15mn.**
- **Fongicide EN14562* (sur Aspergillus Fugimatus) en 5 min.**
- **Levuricide EN1650, EN13697*, EN13624*, EN14562* sur Candida albicans en 5 min.**
- **Virucide EN14476 sur HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, RSV, H1N1, HSV-1, Polyomavirus* en 1 mn, Rotavirus* en 15 mn.**



100 LINGETTES NETTOYANTES - DÉSINFECTANTES GRAND MODÈLE POUR LES SURFACES ET MATÉRIELS Référence : 14099

100 LINGETTES NETTOYANTES - DÉSINFECTANTES GRAND MODELE pour les surfaces et matériels

100 lingettes nettoyantes désinfectantes pour les surfaces, le petit matériel et les dispositifs médicaux non-immérgeables.

Lingettes épaisses et douces..

Indications:

Pour le nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux non-immérgeables et non-invasifs (capteurs de pression, connectiques et câbles, testeur de glycémie, sondes externes, ...).

Tolérance cutanée testée sous contrôle dermatologique.

100 LINGETTES NETTOYANTES - DÉSINFECTANTES GRAND MODELE

Mode d'emploi :

- **Soulever le dévidoir et retirer la petite étiquette placée sur l'orifice.**
- **Tirer ensuite sur la première lingette.**
- **Bien refermer le dévidoir après chaque utilisation.**
- **Produit prêt à l'emploi à usage unique.**
- **Le rinçage est inutile, sauf si le dispositif médical est susceptible d'être en contact avec les muqueuses.**
- **Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu.**
- **A utiliser dans les 3 mois après ouverture.**