

THERMOMÈTRE FRONTAL INFRAROUGE SPENGLER

Référence : 140112

Caractéristiques Techniques du Thermomètre sans contact Infrarouge



Doté de la **technologie infrarouge**, sans contact

Il permet une mesure à une distance de quelques centimètres de la tempe, son écran donne instantanément la température, et offre une capacité de 32 mémoires.

Il est conçu avec **3 modes de mesure**, il est aussi adapté à la prise de température, d'une surface: comme l'eau du bain de bébé par exemple, ou à la température ambiante. Une polyvalence qui fait de lui un instrument très performant.

Spécifications du produit :

Plage de mesure : Corporelle :
32.0°C - 43.0°C (89.6°F - 109.4°F)

Plage de mesure : Surface : 0°C -
60°C (32°F - 140°F)

Résolution de l'écran : 0.1°C (0.1°F)

Distance pour prise de mesure : 3
cm - 5 cm

Mémoire : 32 mesures

Piles : 2 piles LR06 (AA)

Consommation : < 300mW

Autonomie : - 100 000 mesures

Précision : - 32.0°C - 34.9°C (89.6°F -
94.8°F) +0.3°C (+0.6°F)

- 35.0°C - 42.0°C
(95.0°F - 107.6°F) +0.2°C (+0.4°F)

- 42.1°C - 43.0°C
(107.8°F - 109.4°F) +0.3°C (+0.6°F)

Dimensions : 175 (L) x
50 (l) x52 (H) mm

Poids : 126 g (piles
incluses)

Arrêt automatique : 30
secondes

Unité de température :
Celsius / Fahrenheit

Alarme sonore : Si la
température est élevée
(> 38°C / > 100.4°F)

Thermomètre clinique :
Prise de température
instantanée

Conditions d'utilisation
: Température ambiante
10°C - 40°C / Humidité
relative : < 85%

Le thermomètre frontal infrarouge Spengler

THERMOMÈTRE FRONTAL INFRAROUGE SPENGLER

Référence : 140112

- Il mesure **la température corporelle** instantanément en répétant la capture immédiate,
- Il est prêt à l'emploi, **sans contact** (donc sans embout ni stérilisation), et sa prise de température frontale est totalement indolore,
- Extra pour vérifier la température du biberon, du pot et la température ambiante...
- Ne pas laisser pénétrer de liquide dans l'appareil,
- L'appareil n'est pas étanche,

Tempo Easy est **le thermomètre ultra-précis** en toute circonstance.

Sa technologie infrarouge lui permet de prendre des mesures de température sans contact et d'être polyvalent.

Il est parfait pour prendre la température corporelle de façon instantanée, à quelques centimètres de la tempe du patient.

Facile à utiliser et léger, il évite la consommation de couvre-sonde.

Ce thermomètre infrarouge 3 en 1 est livré avec 2 piles AA (LR06)

Qu'est ce qu'un thermomètre sans contact infrarouge ?

Les thermomètres frontaux infrarouges peuvent mesurer la température sans risque de propagation de germes entre les individus car le thermomètre ne touche pas la peau.

Par conséquent, l'appareil est idéal lorsque plusieurs personnes doivent l'utiliser ou pour une utilisation dans un lieu public qui restreint l'accès aux usagés sous conditions d'effectuer une vérification de leur température.

Comment utiliser un thermomètre infrarouge ?

Le thermomètre peut être utilisé pour les adultes, les enfants et les bébés.

La procédure à suivre pour prendre la température avec un thermomètre frontal :



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

THERMOMÈTRE FRONTAL INFRAROUGE SPENGLER

Référence : 140112

1. Veuillez lire le manuel de l'équipement pour comprendre ses caractéristiques avant d'utiliser l'équipement.
2. Placez le thermomètre dans la pièce où la mesure a été prise au moins 15 minutes à l'avance, afin qu'il s'adapte d'une manière ou d'une autre à la température ambiante.
3. Allumez le thermomètre frontal sans contact. Si l'appareil prend quelques secondes pour se préparer, il s'affichera à l'écran.
4. Demandez au patient de se nettoyer les tempes (par exemple en soulevant les cheveux) et d'essuyer la peau lorsqu'il transpire.
5. Pointer la sonde du thermomètre sur l'une des tempes, à la hauteur des sourcils, à 3 à 5 cm de la peau.
6. Appuyez sur le bouton de l'appareil et maintenez-le immobile.
7. Un "bip" sonore indique que la mesure est terminée.
8. Vous pouvez lire les résultats à l'écran.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS Antibes 2022B00815 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502



THERMOMÈTRE FRONTAL INFRAROUGE SPENGLER

Référence : 140112

Quelles sont les avantages d'un thermomètre frontal ?

C'est l'une des questions les plus fréquemment posées sur les thermomètres frontaux infrarouges, et elle est là pour une raison car c'est la première chose qu'un thermomètre exige : la fiabilité.

De par sa rapidité, il augmente l'efficacité et offre la possibilité de mesurer successivement plusieurs températures. Idéal pour les familles nombreuses qui ont besoin de prendre leur température quotidiennement, les crèches et les écoles qui ont fréquemment besoin de prendre la température d'un grand nombre d'élèves, et les entreprises et magasins qui doivent donc vérifier la température des clients ou des employés. .

Il n'y a pas de grande différence d'utilisation entre les thermomètres classiques et les infrarouges. En tout cas, c'est un jeu d'enfant !

En revanche, ce thermomètre possède un écran LCD qui affiche toutes les informations nécessaires sous forme de chiffres ou d'icônes, vous permettant de vous orienter facilement sur l'interface, et le rétroéclairage vous permet de mesurer la température sans alimentation.

3 couleurs permettent de déterminer instinctivement l'état de la personne testée :

- Vert : tout va bien
- Orange : A surveiller
- Rouge : Fièvre importante