

LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale, des collectivités et des entreprises L. au V. de 8h30 à 17h30 04 93 19 20 23

TEST DE GROSSESSE "ELLETEST"

Référence: 22400

TEST DE GROSSESSE ELLETEST



Mode d'emploi:

Ôter le capuchon qui recouvre la mèche d'absorption puis maintenir la mèche d'absorption sous un jet d'urine pendant 15 secondes.

Patienter 3 minutes puis lire le résultat qui s'indique dans la fenêtre de contrôle.

1 ligne = négatif

2 lignes = positif

Le test est à faire idéalement le matin aux premières urines.

TEST DE GROSSESSE ELLETEST

Le test de grossesse urinaire permet de déterminer si la femme est enceinte avec une précision de plus de 99%

Résultat dès le 1er jour de retard des règles (pour une sensibilité de 25UI/L).

Le test est présenté sous la forme d'un stylo avec capuchon à utiliser. Il s'utilise au premier jour de la date présumée des règles.