

SURFA'SAFE PREMIUM 750ML SPRAY DISPENSEUR DE MOUSSE Référence : 23011



Sans rinçage

INDICATIONS

Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces, des dispositifs médicaux non immergeables (sondes échographiques, câbles et connectiques, sondes de rééducation, capteurs de pression, testeurs de glycémie, thermomètres...) , et des structures externes des équipements (respirateurs, générateurs d'hémodialyse...

COMPOSITION

Chlorure de didécyl diméthyl ammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), excipients.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561 : 3 minutes
EN 13727 sur ERV, A. baumannii _LSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, K. pneumoniae OXA 48 : 1 minute
EN 13697 sur ERV, A. baumannii –LSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, SARM : 2 minutes
Levures : EN 1275, EN 13624, EN 13697 : 5 minutes
EN 14562 :15 minutes
Moisissures : EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562 : 20 minutes
Virus : Norovirus : 30 minutes
Rotavirus, PRV, HSV, Vaccinia virus,
BVDV : 1 minute

MODE D'EMPLOI

Appliquer la mousse détergente désinfectante sur la surface ou de préférence sur un non-tissé. Répartir la mousse sur la surface à traiter. Respecter le temps de contact selon l'activité antimicrobienne recherchée.
Laisser sécher. Ne pas rincer (sauf pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, la peau ou les muqueuses).

PRECAUTIONS D'EMPLOI

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS
Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30
04 93 19 20 23

SURFA'SAFE PREMIUM 750ML SPRAY DISPENSEUR DE MOUSSE Référence : 23011

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Dispositif médical classe IIb.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502