

DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE BENEHEART C2

Référence : 29660

Description :



- Défibrillateur externe automatisé conçu pour une utilisation par le grand public dans les lieux professionnels et collectifs.
- Animation couleur claire pour guider la pose des électrodes et la réalisation du massage cardiaque.
- Messages audio étape par étape pour accompagner l'utilisateur tout au long de la réanimation.
- Métronome RCP intégré
- Électrodes mixtes adultes/enfants et simple bouton de sélection du mode, utilisables chez l'enfant à partir de 1 an.
- Enregistrement interne des données d'intervention, récupérables via port USB pour traçabilité et suivi.

Caractéristiques techniques :

- **Garantie appareil** : défibrillateur garanti 8 ans pour une utilisation pérenne.
- **Électrodes** : 1 paire d'électrodes mixtes adultes/enfants, durée de vie 5 ans.
- **Batterie** : autonomie jusqu'à 5 ans ou environ 300 chocs délivrés.
- **Interface et protection** : écran vidéo grand format, indice de protection IP55 (eau et poussière).
- **Énergie et dimensions** : énergie adultes 150/360 J, enfants 50/100 J
- **Dimensions** : 21 × 28 × 8 cm
- **Poids** : 2 kg
- **Langues** : Français/Anglais

Défibrillateur automatique BeneHeart C2 : assistance maximale en cas d'arrêt cardiaque

Le défibrillateur automatique BeneHeart C2 est un défibrillateur externe automatisé avec guidage vidéo et messages vocaux, conçu pour une prise en charge rapide et rassurante de l'arrêt cardiaque soudain en entreprise, collectivité ou lieu recevant du public.

- **Guidage vidéo et vocal**
- **Électrodes mixtes adulte/enfant**
- **Choc délivré en moins de 8 s**
- **Appareil bilingue français/anglais**
- **Option Wi-Fi ou 4G intégrée**

Le défibrillateur est livré avec :

DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE BENEHEART C2

Référence : 29660

- Une carte de suivi des contrôles DAE faisant office de registre de maintenance
- 1 Autocollant " ce site est équipé d'un DAE..."
- 1 Autocollant d'identification du DAE conforme au décret de 2019 sur la signalétique

Mode d'emploi :

- En cas de malaise suspect d'arrêt cardiaque, alerter les secours (112/15/18) et apporter le défibrillateur BeneHeart C2 auprès de la victime.
- Mettre l'appareil sous tension et suivre les instructions vocales et les animations affichées sur l'écran couleur.
- Placer les électrodes mixtes sur le thorax nu selon le schéma indiqué, en choisissant le mode adulte ou enfant avec le bouton dédié.
- Laisser le défibrillateur analyser le rythme cardiaque et s'écarter de la victime lorsque l'appareil l'indique, avant délivrance du choc.
- Reprendre immédiatement le massage cardiaque et suivre les consignes de l'appareil jusqu'à la prise en charge par les services d'urgence.

Précautions d'utilisation :

- Utiliser le défibrillateur uniquement sur une personne inconsciente qui ne respire pas normalement, et toujours après alerte des secours.
- Ne pas placer les électrodes sur un pacemaker visible, sur des patches médicamenteux ou sur une peau très humide ; sécher si besoin.
- Éviter tout contact physique avec la victime lorsque le BeneHeart C2 analyse ou délivre un choc, et s'assurer que personne ne la touche.
- Remplacer la batterie et la paire d'électrodes après utilisation ou lorsque la date de péremption est dépassée.
- Installer l'appareil dans un endroit visible et accessible, le protéger des chocs, de l'humidité excessive et vérifier régulièrement son état de veille.

Un défibrillateur automatique pour les environnements professionnels et ouverts au public

Le défibrillateur automatique BeneHeart C2 est pensé pour sécuriser les **entreprises, collectivités**, établissements scolaires, complexes sportifs, commerces et lieux recevant du public. Son interface intuitive, mêlant messages vocaux et animations vidéo, transforme chaque utilisateur en premier intervenant potentiel face à un arrêt cardiaque soudain. La technologie QShock permet de délivrer le choc en moins de 8 secondes après l'analyse, ce qui contribue à gagner de précieuses secondes dans la chaîne de survie.

Grâce à ses électrodes mixtes adultes/enfants, son indice de protection IP55 et ses options de connexion **Wi-Fi ou 4G**, le BeneHeart C2 s'intègre facilement dans un parc de **défibrillateurs automatiques** existant ou dans une nouvelle stratégie d'équipement. Les données d'intervention sont sauvegardées et récupérables via USB pour assurer la traçabilité. En choisissant ce défibrillateur externe automatisé, vous renforcez concrètement la sécurité de vos collaborateurs, élèves, adhérents ou clients au quotidien.

Retrouvez également l'ensemble de nos [défibrillateurs automatiques](#).