

DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE BENEHEART C1A

Référence : 29760



Description :

- DAE **entièrement automatique** : analyse le rythme et délivre le **choc sans action** sur un bouton si nécessaire.
- **Guidage pas-à-pas** : messages vocaux clairs, **pictogrammes** et **métronomie** pour le massage.
- Interface **grands voyants** pour une lecture rapide en situation de stress.
- **Auto-tests** réguliers et indicateur d'état pour simplifier la maintenance.
- Compatibles avec **électrodes adulte** et **pédiatriques** (ou jeu mixte selon votre choix d'accessoires).*

*Utiliser des électrodes adaptées à l'âge/poids et suivre la notice fabricant.

Caractéristiques techniques :

- **Mode** : DAE **automatique** (choc délivré automatiquement si indiqué)
- **Guidage** : **messages vocaux**, pictogrammes lumineux, **métronomie** RCP
- **Électrodes** : jeu **adulte** et option **enfant/pédiatrique** (consommables à renouveler périodiquement)
- **Alimentation** : **batterie** longue durée (pack scellé, maintenance simple)
- **Maintenance** : **auto-tests** programmés, voyant d'état, registre de suivi conseillé
- **Destination** : ERP, entreprises, établissements scolaires, collectivités, lieux publics

Défibrillateur automatique beneheart C1A : choc entièrement automatique, guidage clair, prise en main immédiate

BeneHeart C1A - DAE entièrement automatique : un défibrillateur simple et intuitif qui **analyse le rythme**, délivre le **choc automatiquement** si indiqué et guide le sauveteur par **messages vocaux** et **pictogrammes**. Conçu pour les **ERP, entreprises, écoles** et collectivités.

- **Choc 100% automatique**
- **Guidage vocal + métronomie**
- **Interface très lisible**
- **Auto-tests de maintenance**
- **Électrodes adulte / enfant***

le défibrillateur est livré avec :

- [Une carte de suivi des contrôles DAE faisant office de registre de maintenance](#)

DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE BENEHEART C1A

Référence : 29760

- 1 Autocollant " ce site est équipé d'un DAE..."
- 1 Autocollant d'identification du DAE conforme au décret de 2019 sur la signalétique

DAE simple d'usage pour une défibrillation rapide et sécurisée

Le **BeneHeart C1A** rend la défibrillation **accessible aux non-professionnels** : il guide les gestes, rythme la **RCP** et délivre le **choc automatiquement** si nécessaire. Sa conception intuitive réduit les hésitations et favorise une **prise en charge précoce** de l'arrêt cardiaque, essentielle à la survie.

fiabilisez votre dispositif de secours : ajoutez le **défibrillateur automatique BeneHeart C1A** à votre panier et équipez vos locaux dès maintenant.

Retrouvez également l'ensemble de nos [défibrillateurs automatiques](#).

Mode d'emploi :

- Mettre le DAE en **marche** et **suivre les messages vocaux**.
- Exposer le thorax, si besoin **sécher/raser** rapidement les zones de pose.
- Coller les **électrodes** selon les pictogrammes (positions antéro-latérales).
- Laisser l'**analyse** se faire ; s'écarter lors de la délivrance du choc **automatique**.
- Reprendre immédiatement la **RCP** au métronome et poursuivre jusqu'à la relève des secours.

Précautions d'utilisation :

- Utiliser des **électrodes en cours de validité** et compatibles C1A.
- Ne pas toucher la victime pendant l'**analyse** et la **choc-thérapie**.
- Éviter les environnements **explosifs/inflammables** ; éloigner l'oxygène concentré.
- Vérifier régulièrement le **voyant d'état** et consigner les **dates** batterie/électrodes.
- Former les équipes aux **gestes qui sauvent** et au protocole interne.