

THERMOMÈTRE FRONTAL AURICULAIRE

Référence : 140120-21



Description du produit

Comment utiliser (pour la température du front):

1.Appuyez sur le "bouton de mesure" (icône d'alimentation) pour allumer;
(Veuillez noter: l'écran LCD affichera "Lo" lorsqu'il est ouvert, c'est un phénomène normal, il suffit d'attendre que le voyant de température s'éteigne. , vous pouvez ensuite l'utiliser pour mesurer la température)

2.Puis appuyez sur le "bouton de mesure" pour scanner votre front, veuillez garder la distance de mesure entre le front et le thermomètre à moins de 0,4 pouces, vous pouvez alors obtenir les lectures (accompagnées d'un long bip)

3.Si vous avez besoin de mesurer à nouveau, veuillez ne pas faire fonctionner jusqu'à ce que le voyant de température s'éteigne (accompagné d'un bip court), veuillez attendre 5 à 10 secondes pour chaque mesure.

Comment éviter l'inexactitude:

Veuillez vous assurer qu'il n'y a pas de saleté sur le capteur de température.

Veuillez vous assurer qu'il n'y a pas d'eau ou d'ombre sur le front.

Veuillez d'abord nettoyer le conduit auditif lorsque vous mesurez la température de l'oreille.

Il est normal d'obtenir les variations entre les mesures orales (0,5 à 1,0 ° F), frontales (0,3 à 0,5 ° F) et auriculaires. Ce n'est pas dû à l'inexactitude du thermomètre.

Comment activer / désactiver le bip:

Appui long sur le "bouton Mémoire / Activer le son" pendant 3 secondes

Facile à utiliser:

C'est la meilleure solution tout-en-un pour la mesure de la fièvre et de la température corporelle

THERMOMETRE Frontal et Auriculaire

- **MODE DOUBLE:** Thermomètre frontal (adapté à tous les âges) et fonction Thermomètre auriculaire (uniquement pour l'enfant de plus de 3 mois) - le moyen le plus simple et le plus pratique de prendre une température.
- **FIABLE ET PRÉCIS:** Un maximum de 35 lectures précédentes est disponible pour vous aider à suivre les changements de votre température corporelle. Fournit des lectures de température avec une précision sans faille et très rapide.
- **SÛR ET HYGIÉNIQUE:** Comparé au thermomètre à mercure, il n'y a aucun risque de casser le verre ou d'avaler du mercure. Il est totalement sûr pour les enfants à utiliser.
- **RAPIDE ET FACILE:** Ce thermomètre électronique est très facile à utiliser. Le thermomètre lit en 1 seconde et un bip suffisamment fort vous avertira que c'est fait.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

THERMOMÈTRE FRONTAL AURICULAIRE

Référence : 140120-21

- 2 piles AAA fournies

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502