

## TENSIOMÈTRE MANOPOIRE AVEC 4 BRASSARDS

Référence : 22048



Tensiomètre manopaire, livré avec 4 brassards (Bébé, Enfant, Adulte et Obèse)

### MODE D'EMPLOI

Positionner correctement le brassard. Fermer la molette. Gonfler le brassard. Ouvrir lentement la molette et mesurer la pression artérielle.

### NETTOYAGE :

Avec un tissu doux et sec ou une avec une solution désinfectante diluée. Retirer la poche en caoutchouc avant de nettoyer le brassard en machine à 30°C ou à la main, ne pas essorer. La poche ainsi que la tubulure peuvent être nettoyées à l'eau tiède savonneuse, boucher l'extrémité du tube avant toute opération pour éviter le remplissage de la poche par du liquide. Rincer et sécher.

### CARACTERISTIQUES :

Tube Lo = 500 mm et 0 externe = 9mm  
Cadran 0 = 65 mm  
Plage de mesure 0 à 300 mmHg  
Précision +/- 3 mmHg  
Echelon 2 mmHg  
Température d'utilisation 10à + 40°C  
Température de stockage - 20 à 40°C, à 85% d'humidité.  
Plage de tolérance du point zéro +/- 3 mmHg

La housse plastique en ABS (Acrylonitrile butadiene styrène), le réservoir en latex, le(s) brassard(s) le sac en nylon et la valve en métal.

### DIMENSIONS BRASSARDS :

Brassard Bébé : 13 x 19cm  
Brassard Enfant : 18.4 x 26.2cm  
Brassard Adulte : 25,4 x 40,6 cm

Brassard XL: 33,3 x 51 cm