

## STÉTHOSCOPE PERFECTO ENFANT DOUBLE PAVILLON

Référence : 22050



Qualité supérieure, tête et lyre en acier inoxydable

Stéthoscope auriculaire double pavillon Enfant.

Qualité supérieure, tête et lyre en acier inoxydable. - Livré avec 2 paires d'embouts souples + 1 paire d'embouts rigides + 1 membrane de rechange.

#### Mode d'emploi

Pour examens médicaux. Mettre les embouts auriculaires dans les oreilles et apposer la membrane sur la partie à écouter. Tourner la tête du stéthoscope pour écouter avec la face petite sans membrane et bague anti-froid (cloche). Ne pas écarter les lyres au maximum risque de rupture de celle-ci.

#### Précaution d'emploi

Ce dispositif ne peut être utilisé que par une personne compétente et qualifiée. A utiliser en usage unique par personne, il est recommandé d'utiliser une fois les stéthoscopes par patient pour éviter les contaminations entre patient.

Nettoyer la surface utilisée après chaque examen avec un désinfectant approprié. Vérifier que les embouts auriculaires soient propres et non bouchés.

#### Pièces constitutives

Oui Tête et bague anti-froid, lyre, tuyau, pair embouts souple.

Accessoires = 1 membrane, pair d'embouts souple vissable de 13 mm, paire embout semi souple de 13mm.

#### Caractéristiques

Dimensions (mm) Tuyau= 540 x 8.8 ; Lyre= 190 x 5 ; Tête= 48 x 21

Résistance température (C°) -10 à +40°C

Poids 165g



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,  
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

**04 93 19 20 23**

## STÉTHOSCOPE PERFECTO ENFANT DOUBLE PAVILLON

Référence : 22050

**1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var**

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : [contact@tamo.fr](mailto:contact@tamo.fr) Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502