

## OXYMÈTRE DE POULS ADULTE

Référence : 22053-15



### **Mode d'emploi**

Enlevez le film protecteur du cadran. Insérez les piles en respectant les pôles. Appuyez sur la pince, placez un doigt, de préférence l'index, dans l'ouverture et relâchez le capot. Appuyez une fois sur l'interrupteur (bouton noir), situé sur le panneau avant. Lisez les données correspondantes sur l'écran d'affichage. Voir mode d'emploi fourni avec l'appareil.

### **Nettoyage**

Avec un chiffon sec ou légèrement humidifié avec du savon. Lors du nettoyage, il faut veiller à ce que le liquide ne pénètre en aucun cas dans l'appareil et les capteurs. Vérifier bien que le capteur n'est pas bouché par de la saleté.

### **Précaution d'emploi**

Le doigt ne doit pas trembler lorsque l'oxymètre fonctionne, attention dans le cas d'un vernis à ongle, les données peuvent être erronées. Certaines mesures peuvent être erronées suite à une mauvaise lecture due notamment, saletés sur la diode de lecture, doigt sale, transpiration importante, ongles abimés ou noircis.

Oxymètre de pouls digital

Garantie 2 ans

Il permet de mesurer en continu le rythme cardiaque, le taux de saturation en oxygène de l'hémoglobine dans les capillaires (saturation pulsée en oxygène ou SpO2), l'intensité du signal pulsatile (barre graphe). Il affiche également la courbe de pléthysmographie.

Ce dispositif médical non-invasif est utilisable aussi bien par les professionnels médicaux, entre autre en médecine d'urgence, que par les patients eux-mêmes.

### **Caractéristiques techniques:**

Pour le contrôle ponctuel de la SpO2.  
Facile d'utilisation. Mise en marche par simple pression sur l'interrupteur.  
Confort de lecture des mesures grâce à l'écran OLED 2 couleurs orientable :

- Affichage simultané en moins de 10 sec. :
- la saturation pulsée en oxygène (% SpO2),
- la fréquence cardiaque,
- l'intensité du signal pulsatile (barre graphe),
- la courbe de pléthysmographie.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,  
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

## OXYMÈTRE DE POULS ADULTE

Référence : 22053-15

- Témoin de batterie faible.
  - Affichage personnalisable : 6 modes d'affichage.
  - 5 niveaux de luminosité.
- Arrêt automatique après 5 secondes de non utilisation.  
Livré avec une dragonne, une housse et 2 piles.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : [contact@tamo.fr](mailto:contact@tamo.fr) Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502