

## SAC DE FROID INSTANTANÉ 8CM X 13CM

Référence : 70070



### Description

Le **sac de froid instantané à usage unique 8cm x 13cm** est une solution de cryothérapie conçue pour soulager rapidement les douleurs liées aux hématomes, foulures, entorses, contusions, coups et chocs.

Cette poche de froid s'active simplement en pressant puis en agitant la pochette. Elle descend alors à -10°C avant de remonter progressivement vers 0°C, température atteinte en 30 minutes.

Son action rafraîchissante aide à atténuer la douleur et l'inflammation après une blessure sportive, un accident domestique ou une situation d'urgence nécessitant une application de froid immédiate.

Le format compact 8 x 13 cm facilite l'intégration du sac de froid dans une trousse de secours, un équipement de premiers soins ou un stock dédié aux coups et chocs. Les matériaux employés garantissent une absence de condensation sur la pochette.

### Caractéristiques techniques

- Référence 70070
- Dimensions 8 x 13 cm
- Format Poche de froid instantané à usage unique
- Usage principal Solution de cryothérapie pour coups et chocs
- Type de risque Hématomes, foulures, entorses, contusions
- Réutilisable Non, usage unique

### Propriétés du sac de froid instantané

Ce sac de froid instantané est une **poche de cryothérapie à usage unique** de 8 x 13 cm. Après pression et agitation, la pochette descend à -10°C avant de remonter progressivement vers 0°C en 30 minutes. Son action rafraîchissante aide à soulager les hématomes, foulures, entorses, contusions et douleurs liées aux coups et chocs, avec une pochette conçue sans condensation.

## Sac de froid instantané 8cm x 13cm : poche à usage unique pour coups et chocs

**Sac de froid instantané 8cm x 13cm** à usage unique, conçu pour apporter une action rafraîchissante rapide en cas d'hématomes, foulures, entorses, contusions ou douleurs liées aux coups et chocs.



## SAC DE FROID INSTANTANÉ 8CM X 13CM Référence : 70070

- Format 8 x 13 cm
- Usage unique
- Activation simple
- Froid jusqu'à -10°C
- Sans condensation

### Mode d'emploi

- Presser la pochette pour activer l'action rafraîchissante.
- Agiter la pochette après pression.
- Appliquer le sac de froid selon le besoin sur la zone concernée.
- Utiliser la poche comme une solution de froid à usage unique.
- Ne pas réutiliser après usage.

## Une poche de froid compacte pour agir rapidement après un choc

Le **sac de froid instantané 8cm x 13cm** répond aux besoins des structures qui souhaitent disposer d'une solution simple face aux coups, chocs, entorses, foulures, hématomes et contusions. Son activation par pression puis agitation permet d'obtenir rapidement une action réfrigérante, sans congélateur ni préparation préalable.

Son format compact facilite le rangement dans une trousse de secours, un sac d'intervention, un vestiaire sportif, un véhicule ou un poste de premiers soins. Pour compléter votre équipement dédié aux douleurs, coups et chocs, retrouvez nos [solutions de froid et bandes associées](#).

### Comment activer le sac de froid instantané ?

+

Il suffit de presser puis d'agiter la pochette pour activer l'action rafraîchissante. Le froid est ainsi disponible sans préparation préalable.

### Quelle température atteint cette poche de froid ?

+

Après activation, la pochette descend à -10°C avant de remonter progressivement vers 0°C. La température de 0°C est atteinte en 30 minutes.

### Pour quels types de blessures utiliser ce sac de froid ?

+

Ce sac de froid est indiqué pour soulager les hématomes, foulures, entorses, contusions et douleurs liées aux coups et chocs. Son action rafraîchissante aide à atténuer la douleur et l'inflammation.



## SAC DE FROID INSTANTANÉ 8CM X 13CM Référence : 70070

### **Ce sac de froid est-il réutilisable ?**

+

Non, il s'agit d'une poche de froid à usage unique. Elle doit être utilisée une seule fois après activation.

### **Le sac de froid provoque-t-il de la condensation ?**

+

Les matériaux employés garantissent une absence de condensation sur la pochette. Cela facilite son utilisation dans une trousse de secours ou en situation d'urgence.