

DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION LIFELINE AUTOMATIQUE ET SEMI-AUTOMATIQUE

Référence : 29001

Description :



- Simule le défibrillateur Lifeline opérationnel pour des exercices de défibrillation au plus proche de la réalité.
- Contour rouge vif permettant d'identifier immédiatement l'appareil comme un défibrillateur de formation.
- Instructions vocales haute définition et métronome intégré pour guider pas à pas les stagiaires.
- Télécommande et scénarios préprogrammés pour adapter facilement la session au niveau du public formé.
- Batterie de formation rechargeable et consommables économiques pour optimiser le budget de formation dans la durée.

Caractéristiques techniques :

- **Mode d'utilisation** : fonctionnement en mode automatique (DEA) et semi-automatique (DSA) pour couvrir tous les usages Lifeline.
- **Scénarios intégrés** : 6 scénarios préprogrammés par mode, pilotables via la télécommande pour simuler différents rythmes cardiaques.
- **Alimentation** : batterie de formation rechargeable sur secteur (environ 12 h de charge pour une journée d'utilisation).
- **Dimensions / poids** : 22 x 30 x 7 cm ; environ 1,9 kg batterie incluse pour un transport facile.
- **Contenu du kit** : défibrillateur de formation Lifeline, paire d'électrodes adulte, batterie rechargeable, chargeur, télécommande, guide utilisateur.

Défibrillateur de formation Lifeline : formation réaliste et sécurisée

Reproduisez fidèlement l'usage d'un DAE Lifeline opérationnel pour former vos équipes en toute sécurité, sans délivrer de choc réel.

- **Double mode DEA / DSA**
- **Formation réaliste sécurisée**
- **6 scénarios préprogrammés**
- **Batterie rechargeable longue durée**
- **Consommables économiques**

Mode d'emploi :

- Charger complètement la batterie de formation à l'aide du chargeur fourni (environ 12 heures) avant la session.
- Insérer la batterie dans le défibrillateur de formation Lifeline et vérifier le bon démarrage de l'appareil.



DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION LIFELINE AUTOMATIQUE ET SEMI-AUTOMATIQUE

Référence : 29001

- Connecter la paire d'électrodes de formation et les positionner sur le mannequin en suivant les schémas illustrés.
- Sélectionner le mode automatique ou semi-automatique et choisir le scénario souhaité via la télécommande.
- Lancer l'exercice et suivre les instructions vocales ainsi que le métronome pour rythmer les compressions thoraciques et les gestes de réanimation.

Précautions d'utilisation :

- Utiliser exclusivement ce défibrillateur pour la formation, ne jamais l'employer sur un patient réel.
- Employer uniquement des mannequins et électrodes de formation compatibles Defibtech, tels que recommandés par le fabricant.
- Contrôler régulièrement l'état des câbles, électrodes et de la batterie ; remplacer sans délai tout élément endommagé ou usé.
- Ne pas ouvrir le boîtier ni modifier l'appareil ; se référer systématiquement au manuel utilisateur pour toute manipulation.
- Stocker le défibrillateur de formation à l'abri de l'humidité, de la poussière et des températures extrêmes entre deux sessions.

Un défibrillateur de formation idéal pour les gestes qui sauvent

Le défibrillateur de formation Lifeline mode automatique et semi-automatique est conçu pour optimiser vos **sessions de formation aux premiers secours**. Ce DAE de formation permet de travailler en conditions quasi réelles tout en restant totalement sûr pour les stagiaires : aucun choc n'est délivré, mais les **instructions vocales HD**, le **métronome** et les **scénarios préprogrammés** reproduisent fidèlement l'utilisation d'un DAE opérationnel. Idéal pour la **formation au massage cardiaque**, à la défibrillation et aux **gestes qui sauvent** en entreprise, collectivité, établissement scolaire ou association de secourisme.

Grâce à sa **batterie rechargeable**, à ses **consommables économiques** et à son **double mode DEA / DSA**, ce défibrillateur de formation Lifeline s'intègre facilement dans votre programme pédagogique. Vous formez vos équipes à l'usage du DAE dans un environnement maîtrisé, tout en optimisant vos coûts de matériel et en garantissant une **pédagogie progressive** : rythmes choquables ou non choquables, électrodes mal positionnées, électrodes non raccordées, etc. Un outil indispensable pour renforcer la culture **sécurité et secourisme** au sein de votre organisation.