


PACK 5 ÉLECTRODES LIFELINE ADULTE DE FORMATON

Référence : 29003

Description :

- Pack de 5 paires d'électrodes de formation adulte pour assurer plusieurs sessions sans rupture de consommables.
- Electrodes dédiées exclusivement à la formation, pour reproduire le positionnement des pads en condition réelle.
- Partie adhésive remplaçable qui se fixe par velcro sur le câble déjà en votre possession.
- Adhérence étudiée pour supporter de nombreux collés-décollés sur les mannequins de secourisme.
- Solution simple et économique pour maintenir vos défibrillateurs de formation Lifeline View opérationnels toute l'année.

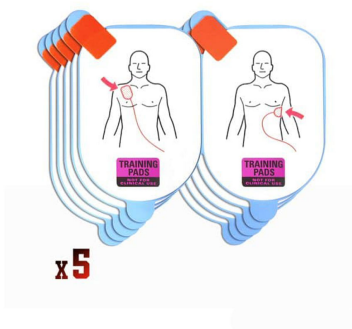

Caractéristiques techniques :

- **Conditionnement** : lot de 5 paires d'électrodes adulte de formation.
- **Compatibilité** : défibrillateurs de formation DEA-DSA Lifeline View (réf. DTF-E2000).
- **Durabilité** : environ 100 collés-décollés par électrode, selon conditions d'usage.
- **Surface adhésive** : 103 cm² par électrode pour un maintien stable sur le mannequin.

Lot électrodes adulte Lifeline formation 5 paires : consommable économique pour vos sessions

Renouvelez facilement vos électrodes de formation tout en maîtrisant vos coûts, avec des pads compatibles Lifeline View conçus pour supporter de nombreux collés-décollés sur mannequins.

- **Pack économique 5 paires**
- **Compatible Lifeline View**
- **Environ 100 collés-décollés**
- **Surface adhésive optimisée**
- **Installation par velcro pratique**

Mode d'emploi :

- Vérifier que le défibrillateur de formation Lifeline View est éteint avant de manipuler les électrodes.
- Positionner le rond velcro prévu à cet effet sur le câble de connexion déjà en place sur votre appareil de formation.
- Fixer la partie adhésive de chaque électrode sur le velcro, en veillant à ce qu'elle soit correctement maintenue.
- Appliquer les électrodes sur le mannequin de secourisme en respectant les schémas de positionnement indiqués pour l'adulte.



PACK 5 ÉLECTRODES LIFELINE ADULTE DE FORMATON

Référence : 29003

- Après la session, décoller délicatement les électrodes du mannequin et les replacer proprement pour une prochaine utilisation.

Précautions d'utilisation :

- Ne pas utiliser ces électrodes sur une victime réelle : elles sont exclusivement destinées à la formation.
- Employer ces électrodes uniquement avec des défibrillateurs de formation Lifeline View compatibles, selon les recommandations du fabricant.
- Éviter de manipuler les surfaces adhésives avec des mains sales ou grasses afin de préserver le pouvoir collant.
- Remplacer le lot dès que l'adhérence diminue ou que les pads présentent des signes d'usure prononcée.
- Conserver les électrodes dans un endroit propre, sec et à température modérée, à l'abri de la lumière directe et de la poussière.

Des électrodes de formation adaptées au défibrillateur Lifeline View

Le lot d'**électrodes adulte Lifeline formation** constitue un consommable indispensable pour vos **défibrillateurs de formation Lifeline View**. Grâce à ce pack de 5 paires, vous disposez d'un stock suffisant pour enchaîner les sessions de **formation aux gestes qui sauvent** sans interruption : positionnement des pads, simulation du choc, apprentissage des bons réflexes en situation d'**arrêt cardiaque**. Les surfaces adhésives de 103 cm² offrent un maintien stable sur les mannequins, tout en permettant des collés-décollés répétés.

Compatibles avec les **DEA-DSA Lifeline View** (réf. DTF-E2000), ces électrodes de formation sont spécialement conçues pour les organismes de formation, entreprises, collectivités, établissements scolaires et associations de secourisme qui souhaitent optimiser leurs coûts. En optant pour ce lot, vous sécurisez la continuité de vos programmes de **secourisme** et de **sensibilisation à la défibrillation**, tout en garantissant un matériel de formation conforme aux préconisations du fabricant Defibtech.