

PAIRE D'ÉLECTRODES OPÉRATIONNELLES ADULTE LIFELINE

Référence : 29012

Description :



- Paire d'électrodes adulte spécialement conçues pour les défibrillateurs Lifeline Defibtech, livrées en étui hermétique.
- Électrodes pré-connectées en permanence au défibrillateur pour gagner de précieuses secondes lors de la mise en route.
- Gel conducteur pré-gélifié assurant une excellente adhérence sur la poitrine du patient pendant toute l'intervention.
- Électrodes non polarisées et interchangeables, limitant les risques d'erreur de positionnement en situation d'urgence.
- Étui compact se plaçant à l'arrière du défibrillateur et pouvant être stocké dans la sacoche ou l'armoire murale de rangement.

Caractéristiques techniques :

- **Type de produit** : paire d'électrodes adulte pour défibrillateurs Lifeline Defibtech.
- **Compatibilité** : DAE Lifeline entièrement automatique et semi-automatique (DEA / DSA).
- **Longueur de câble** : 122 cm pour un positionnement confortable autour de la victime.
- **Surface de gel actif** : 103 cm² par électrode pour un contact optimal.
- **Durée de vie / usage** : date de péremption 2 ans, électrodes à usage unique (à remplacer après utilisation ou ouverture du sachet).

Paire d'électrodes adulte Lifeline : remplacement rapide pour défibrillateur opérationnel

Assurez un remplacement immédiat de vos électrodes usagées ou périmées avec des pads pré-connectés, pré-gélifiés et non polarisés, prêts à être utilisés en quelques secondes en cas d'arrêt cardiaque.

- **Pré-connectées au DAE**
- **Pré-gélifiées, forte adhérence**
- **Non polarisées, sans erreur**
- **Câble 122 cm pratique**
- **Durée de vie 2 ans**

Mode d'emploi :

- Vérifier régulièrement la date de péremption indiquée sur l'étui hermétique des électrodes adulte Lifeline.
- En situation d'urgence, allumer le défibrillateur Lifeline puis ouvrir le sachet d'électrodes juste avant l'intervention.



PAIRE D'ÉLECTRODES OPÉRATIONNELLES ADULTE LIFELINE

Référence : 29012

- Retirer les protections adhésives et appliquer les électrodes sur la poitrine nue du patient en suivant les schémas imprimés.
- Laisser les électrodes en place jusqu'à la fin de la prise en charge, en suivant les consignes vocales du défibrillateur.
- Après utilisation ou ouverture du sachet, jeter les électrodes conformément aux procédures internes et installer immédiatement une nouvelle paire dans son logement.

Précautions d'utilisation :

- Ne jamais réutiliser les électrodes, même si aucun choc n'a été délivré : elles sont strictement à usage unique.
- Ne pas mélanger ces électrodes avec celles d'un autre fabricant ou d'un autre modèle de défibrillateur.
- Veiller à ce que la peau soit sèche, débarrassée de poils excessifs, de patches et de bijoux au niveau des zones de pose.
- Conserver les électrodes dans leur étui hermétique, à température modérée, à l'abri de l'humidité et des rayons directs du soleil.
- Remplacer immédiatement toute paire d'électrodes dont l'emballage est endommagé ou dont la date de péremption est dépassée.

Un consommable indispensable pour votre défibrillateur Lifeline

La **paire d'électrodes adulte Lifeline** est un consommable essentiel pour garantir l'efficacité de votre **défibrillateur automatisé externe**. Grâce à leur conception **pré-connectée, pré-gélifiée et non polarisée**, ces électrodes réduisent les risques d'erreur et permettent une mise en œuvre rapide lors d'un **arrêt cardiaque soudain**. Leur surface de gel conducteur de 103 cm² assure un contact optimal pour une défibrillation efficace, en conformité avec les recommandations de Defibtech.

Avec une **durée de vie de 2 ans** et un **usage unique**, ces électrodes adulte s'intègrent parfaitement dans la gestion de vos **consommables DAE** en entreprise, collectivité, établissement scolaire ou structure sportive. En maintenant toujours une paire d'électrodes en stock, vous garantisiez que votre **défibrillateur Lifeline** est prêt à intervenir à tout moment et contribuez à renforcer votre dispositif global de **sécurité cardiaque** et de **prévention des risques**.